

## ORTOOSI JOUSTAVA ASENTOTUNTO NIVELRIKKO EPITHELIUMFLEX®

### KÄYTTÖAIHEET

Auttaa lievittämään nivelkipuja peukalon tyvessä (nivelrikko), rajoittaen mikroliikkeitä.

### VASTA-AIHEET

- Älä käytä haavaisella tai vahingoittuneella iholla.
- Jos turvotus on voimakasta: seuraa käden kuntoa käytön aikana. Riisu tukisidos, mikäli se kiristää liikaa ja vaikeuttaa verenkiertoa. Jos olet epävarma, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekin henkilökunnalta.

### VAROTOIMENPITEET


- Pestävä ennen käyttöönottoa.
- Tämä tuote on tukisidos päiväkäyttöön.
- Sitä on saatavilla kahtena versiona: oikea käsi ja vasen käsi (ompeleen on sijaittava käden sisäpuolella).
- Ei saa käyttää avotulen tai valohehkuisen esineen vieressä.

### TOIMINTA

Joustava, asentotuntoa parantava tukisidos EPITACT® auttaa säilyttämään päivän aikana käden koko toiminnallisuuden. Se täydentää jäykkien tukisidosten käyttöä, jotka sopivat paremmin yökäyttöön.

### PAIKALLEENLAITTO

Pue tukisidos käteen liu'uttamalla peukalo paikalleen. Ompeleen on asetettava käden sisäpuolelle. Saat ihanteellisen mukavuuden, kun säädät tukisidoksen asentoa siirtämällä ompeleen paikkaa hieman lähemmäksi tai kauemmaksi käden sisäosan keskustaa.

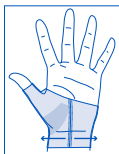

### HUOLTO

- Pese koneessa 30°C lämpötilassa mukana olevassa pesupussissa tai käsin (ei saa hangata).
- Ei saa käyttää tahrannoistoaaineita (asetonia, liuottimia, tms).
- Hävitä heti laite ja vaihda se uuteen, jos kankaassa tai saumoissa näkyy vaurioita.
- Anna kuivua luonnollisesti. Ei saa silittää.

**KOOSTUMUS:** 86% polyamidi-/elastaanikangasta, 14% silikonista.

Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee kipua tai jokin muu epätavallinen reaktio. Kaikista laitteeseen liittyvistä merkittävistä tapahtumista on ilmoitettava valmistajalle ja asianmukaiselle terveysviranomaiselle.

MILLET Innovation ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden laiminlyönnistä. Ranskan on viittaus kieli. Alkuperäinen CE-merkintä: 2013.



Konepesu 30°C.



Ei silitystä tai höyryä.



Eikuivapesua.



Ei klooria.



Ei koneellista kuivausta.

**LOT**

Katso pakkausta.